



Guía de uso del asiento Uplift Premium Power Lifting Seat

INDICACIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

PELIGRO – Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica:

1. Siempre desconecte el Uplift Power Lifting Seat antes de limpiarlo.

ADVERTENCIA - Para reducir el riesgo de quemaduras, incendios, descargas eléctricas o heridas:

1. Desconecte el asiento antes de colocarlo o quitarle alguna parte.
2. Se requiere una supervisión estrecha cuando este producto es utilizado por niños o cerca de ellos.
3. Se requiere una supervisión estrecha cuando este producto se utiliza cerca de mascotas o animales.
4. Utilice el Uplift Power Lifting Seat únicamente para los fines que se indican en estas instrucciones.
5. Evite utilizar accesorios no recomendados por el fabricante.
6. No encienda el Uplift Power Lifting Seat si algún cable o clavija se encuentran dañados, si no funciona adecuadamente, si le cayó agua, si sufrió alguna caída o algún otro daño. En esos casos, envíelo al centro de servicio para su revisión y compostura.
7. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
8. Nunca deje caer o inserte objetos extraños en ninguna de las aberturas.
9. No lo utilice al aire libre.
10. No lo moje ni lo utilice cerca del agua.
11. Para desconectarlo, ponga los controles en apagado y desconecte la clavija del tomacorriente.
12. Al desconectar, no jale el cable. Se debe tirar de la clavija, no del cable.
13. Desconecte cuando no se utiliza y antes de darle servicio o limpiarlo.
14. Para una mayor estabilidad al sentarse o ponerse de pie, coloque el Uplift Power Lifting Seat únicamente en sillones con descansabrazos y en sofás con al menos un descansabrazo. El Uplift Power Lifting Seat no debe utilizarse en sillas mecedoras, sillas de ruedas, sillas de oficina ni ninguna otra silla con ruedas. No lo utilice tampoco en vehículos motorizados.
15. Al momento de la utilización mantenga los dedos lejos del mecanismo de elevación.
16. Evite el contacto directo con todo tipo de fuente de calor.
17. No lo utilice en los baños.
18. Consulte a su médico para verificar que no existen restricciones físicas o algún otro motivo médico que contraindique el uso seguro del Uplift Power Lifting Seat.
19. No opere de aerosol (spray) o donde se utilizan se esté administrando oxígeno.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

El Uplift Power Seat fue diseñado únicamente para uso domestico.

Descargo de responsabilidad

Esta Guía de uso incluye las instrucciones y recomendaciones para usar el producto de manera segura y adecuada. Carex Health Brands no se responsabiliza por los daños a la propiedad o las lesiones personales que pudieran surgir del uso inseguro o inadecuado del asiento Uplift Premium Power Lifting Seat.

Carex Health Brands no se responsabiliza por las lesiones y/o los daños causados por no usar un buen criterio o el sentido común. Si tiene dificultades para usar el asiento Uplift Premium Power Lifting Seat o siente que no está preparado para usarlo con seguridad y confianza, comuníquese con la tienda dónde lo compró para obtener asistencia.





Usuarios del asiento Power Seat, ¡bienvenidos!

Gracias por haber adquirido el Uplift Power Lifting Seat. Este asiento fue diseñado para ofrecerle una máxima comodidad y conveniencia. Brindándole el cuidado necesario, usted disfrutará muchos años de una asistencia garantizada para su movilidad.

Instrucciones de seguridad

Su Uplift Power Seat se encuentra equipado con una llave de seguridad que evita que los niños lo accionen accidentalmente. El asiento no se activará si la llave no está puesta.

ADVERTENCIA: CUANDO EL ASIENTO NO SE UTILICE, QUITE LA LLAVE DE SEGURIDAD Y MANTÉNGALA LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

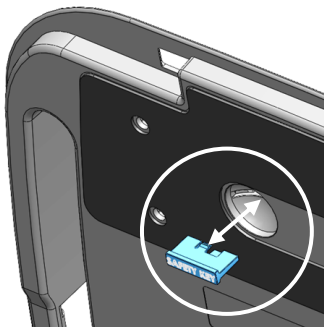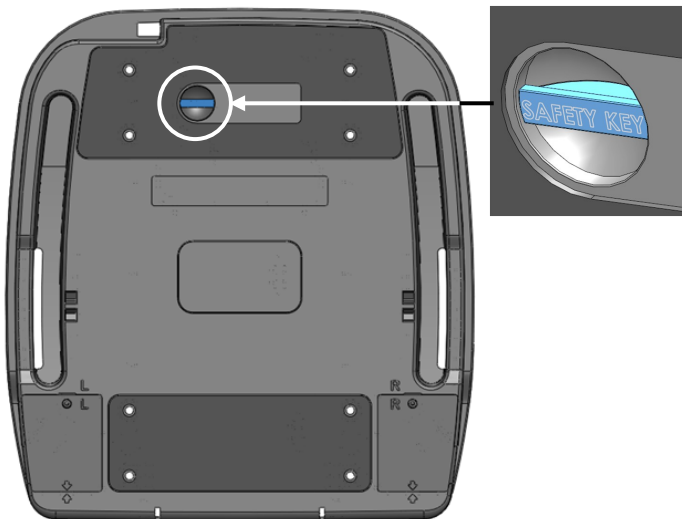

CLAVIJA POLARIZADA

Como medida de seguridad para reducir el riesgo de descargas eléctricas, el Uplift Power Seat cuenta con una clavija polarizada (una de las navajas es más ancha que las otras). Sólo hay una forma en que la clavija entra en el tomacorriente. Si la clavija no entra completamente, invíértala. En caso de no poder conectarla, solicite a un electricista calificado que instale la clavija adecuada. La clavija no deberá cambiarse por ningún motivo.

CABLE DE ELECTRICIDAD

- a) En caso necesario y con el debido cuidado podrá utilizarse una extensión.
- b) Si se utiliza una extensión:
 - La capacidad eléctrica de la extensión debe ser al menos igual a la capacidad del cable del Uplift Power Seat y
 - El cable deberá estar instalado de manera que los niños no puedan jalarlo y que nadie pueda tropezarse involuntariamente.
 - El cable de la extensión debe ser trifásico con conexión a tierra.

TORNILLO A PRUEBA DE DESGASTE

Advertencia: Este producto viene equipado con un tornillo a prueba de desgaste para evitar que la cubierta exterior sea retirada. Para disminuir el riesgo de un incendio o una descarga eléctrica, no intente quitar la cubierta exterior; en su interior no hay partes que puedan ser reparadas o remplazadas por el usuario.

Un técnico autorizado debe encargarse de las reparaciones. Nota: un técnico especializado deberá remplazar los cables de la electricidad dañados. Todo servicio de mantenimiento, con excepción de los indicados en estas instrucciones de uso, debe ser llevado a cabo por un representante de servicio técnico autorizado.

Cuando no se utilice, el Uplift Power Seat debe desconectarse y quitarse la llave de seguridad. El Uplift Power Seat debe almacenarse en su empaque original.

Especificaciones

Homologado por CSA y C/US

Patente de EE. UU. nro. 6.702.383 y nro. 5.316.370. Otras patentes de EE. UU., Europa e internacionales en trámite.

Tamaño del asiento	Modelo de 17 pulg.	Modelo de 20 pulg.
Largo:	19.25"/48.9 cm	
Ancho:	17"/45 cm	20"/50 cm
Peso:	13 libras/5,9 kg	17 libras/7,7 kg
Funda:	100% poliéster e impermeable	

Altura del asiento:

Levantado: 10,5"/26,7 cm

Plano (*bajado*): 4,25"/10,8 cm

Capacidad:

Para usuarios con un peso máximo de 300 libras/136 kg

Suministro eléctrico: 120 Vac 60 Hz 0,6 A

Largo del cable: 112"/285 cm


Control manual

Asiento elevador en su posición plana

Brazo flexible

Funda impermeable con cierre.

Cable

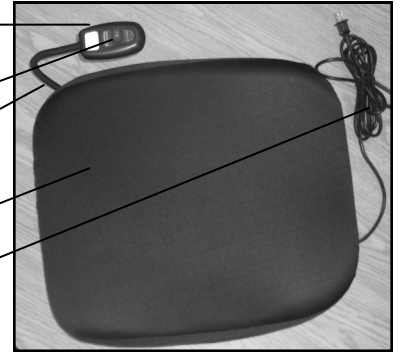

Verifique que el embalaje incluya todas las piezas. Comuníquese con el distribuidor en caso de piezas faltantes o dañadas. Envíe la Tarjeta de la garantía o inscríbese hoy en www.up-lift.com para asegurarse de estar registrado.

Ensamblaje y prueba

Para asegurar un funcionamiento adecuado y evitar choques eléctricos, siga las siguientes instrucciones de ensamblaje.

1. Coloque el asiento Uplift Premium Power Lifting Seat sobre una silla adecuada
2. Asegúrese de que el control manual se encuentre a su derecha y que pueda acceder a él para operar el asiento eléctrico.
3. Enchufe el cable en un tomacorrientes.
4. Pruebe el asiento eléctrico antes de usarlo para asegurarse de que funciona adecuadamente.

Antes de usar su asiento Power Seat

1. Revise el contenido del embalaje para verificar que incluya todos los componentes y que estén en buenas condiciones (ver ilustración).
2. Pruebe el asiento elevador para asegurarse de que funciona bien.

Contenido del embalaje

El asiento Uplift Premium Power Lifting Seat incluye los siguientes componentes:

1. Uplift Premium Lifting Power Seat (*en posición plana*) con el cable.
2. Funda impermeable con cierre.
3. Guía de uso del asiento Uplift Premium Power Lifting Seat
4. Tarjeta de registro para la garantía.

Nota:

Su asiento Uplift Premium Power Lifting Seat se detendrá cuando llegue a su altura máxima o cuando se lo baje. Puede detener el asiento a cualquier altura colocando el interruptor de palanca en su posición media.

Preparación para el uso

Esta sección explica cómo usar el asiento Uplift Premium Power Lifting Seat con seguridad.

Elegir las sillas adecuadas

El asiento Uplift Premium Power Lifting Seat puede usarse en casi todas las sillas, sillones y sillones reclinables, pero siempre junto a un apoyabrazos. Esto garantiza su estabilidad al usar el asiento Uplift Premium Power Lifting Seat. También recomendamos que la silla o sillón esté sobre una superficie estable y nivelada.

Preparación para el uso

Cuando coloque el asiento Uplift Premium Power Lifting Seat sobre la silla o el sofá, el control manual deberá estar en el frente, del lado de la mano derecha y sin obstrucciones.

Asegúrese de que el cable no esté debajo de la base del asiento para evitar daños o que se desenchufe. Verifique que el cable esté colocado de manera tal que nadie pueda tropezarse con él.

Con el asiento Uplift Premium Power Lifting Seat se agregarán tres pulgadas (3"/8cm) (cuatro pulgadas) (cuatro pulgadas y media) a la altura de su silla, sillón reclinable o sofá una vez que esté sentado. Para usar el asiento Uplift Premium Power Lifting Seat con seguridad, deberá mantener ambos pies sobre el piso en todo momento.

Existen tres maneras de mantener los pies en el piso en todo momento mientras usa el asiento (Pruébelas en el orden indicado):



1. Detenga el asiento para controlar la altura. Coloque el interruptor de palanca en la posición del medio para detener el asiento en un lugar donde pueda salir de la silla cómodamente con ambos pies en el piso. Cuando se siente, el asiento Power Seat deberá estar colocado en el nivel que sea ideal para usted.
2. Si se puede sacar el almohadón del asiento de la silla o sofá, intente usar el asiento Uplift Premium Power Lifting Seat sin el almohadón o cambie este por un almohadón más bajo.
3. Disminuya la altura de la silla o sofá ajustando las patas de modo tal que los pies estén apoyados en el piso.

Ahora que el asiento Uplift Premium Power Lifting Seat está ubicado en la silla o el sofá, mueva suavemente el interruptor de palanca para que el asiento suba a una posición que le permita mantener ambos pies sobre el piso. Puede detenerlo en cualquier altura adecuada moviendo suavemente el interruptor de palanca a la posición central de "detener" o bien dejar que el asiento llegue hasta su altura máxima.

Ahora el asiento Uplift Premium Power Lifting Seat está listo para usar!

Nota:

Si tiene que dar un saltito para sentarse sobre el asiento Uplift Premium Power Lifting Seat, lo ha subido demasiado. Tan solo bájelo para poder sentarse con ambos pies sobre el piso.

Instrucciones de uso

Cuando use el asiento Uplift Premium Power Lifting Seat, mantenga al menos una mano sobre el apoyabrazos de la silla o sofá para garantizar la estabilidad.

Nota: El asiento Uplift Premium Power Lifting Seat debe estar en la posición elevada.

Bajar a la posición de sentado

- De espaldas a la silla, coloque la/s mano/s en el/ los apoyabrazos de la silla o sofá.
- Siéntese sobre el asiento en su posición elevada, manteniendo ambos pies bien apoyados en el piso.
- Accione el interruptor de palanca para bajar a la posición de sentado; el motor se detendrá al alcanzar la posición más baja.
- Mientras el asiento está subiendo podrá detener el motor en cualquier altura que le sea cómoda. Detenga el asiento colocando el interruptor de palanca en la posición media.



Bajar el asiento elevador

Para bajar el asiento a la posición de sentado, mueva el interruptor de palanca suavemente y luego suéltelo. Se detendrá cuando haya bajado por completo o cuando usted mueva el interruptor a la posición media.

Levantarse desde la posición de sentado

- Coloque la/s mano/s en el apoyabrazo/s de la silla o del sofá con ambos pies en el piso.
- Accione el interruptor de palanca para subir a una posición en la que se puede levantar cómodamente; el motor se detendrá en la posición más alta.
- Mientras el asiento está subiendo podrá detener el motor en cualquier altura que le sea cómoda. Detenga el asiento con tan solo colocar el interruptor de palanca en la posición media.



Subir el asiento

Para subir el asiento a la posición de sentado, mueva el interruptor de palanca suavemente y luego suéltelo. Se detendrá cuando llegue a su altura máxima o cuando usted mueva el interruptor de palanca a la posición media.

Cuidado y mantenimiento

Para cuidar y mantener el asiento Uplift Premium Power Lifting Seat adecuadamente, lea detenidamente las siguientes instrucciones.

Cuidado fácil

El asiento Uplift Premium Power Lifting Seat viene equipado con una funda impermeable y lavable. La superficie de la espuma con memoria de tres capas (espuma cómoda de capas múltiples) también está revestida con una funda impermeable para facilitar su cuidado.

Siga las siguientes instrucciones para cuidar el producto adecuadamente:

- Limpie de inmediato todo derrame sobre la funda.
- Quite la funda con cierre para lavarla o para limpiar la superficie del almohadón de espuma.
- Lave la funda en la lavadora con agua **fría** y **cuélguela para secar**.
- Limpie la superficie del almohadón de espuma con una esponja húmeda. (Recomendamos usar detergentes y limpiadores suaves.)



Inspección de los componentes eléctricos

Recomendamos revisar el asiento Uplift Premium Power Lifting Seat en forma rutinaria para asegurarse de que funcionará sin problemas durante años. Inspeccione visualmente el cable para detectar si está gastado o agrietado.

Si detecta un problema con alguno de los componentes del sistema eléctrico, comuníquese de inmediato con el distribuidor autorizado del asiento Uplift Premium Power Lifting Seat.

No intente reparar un problema eléctrico por su cuenta.

Nota: Si intenta reparar los componentes eléctricos puede lesionarse y anulará la garantía.

Solución de problemas

¿Qué sucede si el asiento Uplift Premium Power Lifting Seat no funciona cuando acciono el interruptor palanca?

- Verifique que el cable esté bien enchufado en un tomacorrientes de pared con conexión a tierra.
- Si la conexión del cable es adecuada, revise el cortacircuitos como último paso antes de concluir que el producto tiene un problema.

¿Dónde se encuentra el número de serie en el asiento elevador?

El número de serie es una cifra de 10 dígitos que se encuentra en una pegatina blanca y angosta ubicada en la base del asiento.

¿Cómo procedo si tengo problemas para instalar o usar el asiento Uplift Premium Power Lifting Seat?

Primero, lea todas las instrucciones detenidamente para asegurarse de que ha instalado su asiento correctamente. Si continúa teniendo dificultades o siente que no está en condiciones de operar el asiento con seguridad, comuníquese con un distribuidor autorizado del Uplift Premium Power Lifting Seat para que lo asista.



Uso correcto: ambos pies en el piso

Antes de sentarse, asegúrese de que el asiento Uplift Premium Power Lifting Seat se encuentra en la altura ideal para usted de modo tal que pueda sentarse teniendo ambos pies en el piso. Mantenga al menos una mano sobre un apoyabrazos para sostenerse cuando sube y baja el asiento.




Uso incorrecto: el almohadón está demasiado alto

Si el asiento Uplift Premium Power Lifting Seat está demasiado alto, tendrá dificultades para sentarse viéndose obligado a dar un saltito para apoyarse en el almohadón. Para mantener la estabilidad y disminuir los riesgos de caídas, baje el almohadón hasta una altura que le permita mantener sus pies apoyados en el piso.



Uso incorrecto: sentándose torcido

Si el asiento Uplift Premium Power Lifting Seat está colocado correctamente usted debería estar sentado derecho con ambos pies apoyados en el piso. Si nota que se va hacia el costado, el asiento está demasiado alto para usted y se podría caer o dañar el producto. Baje el almohadón a la altura correcta.

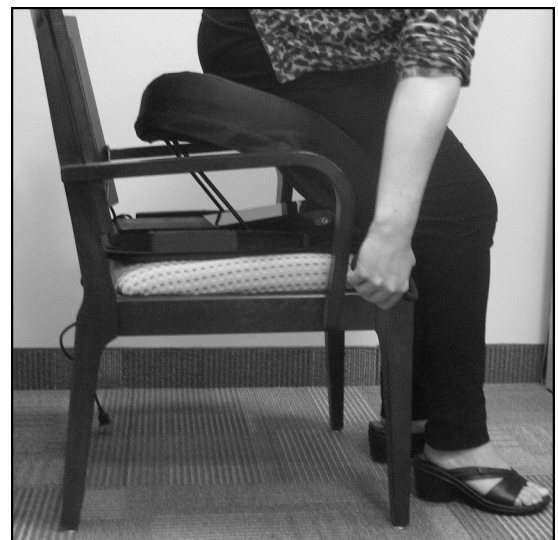

Uso incorrecto: demasiada fuerza para accionar el interruptor de palanca

El interruptor de palanca se acciona haciendo un mínimo de fuerza. Demasiada fuerza es innecesaria y se podría romper el interruptor de palanca.



Guía de uso del asiento

Uplift Premium Power Lifting Seat

Devoluciones bajo la garantía

Si el asiento Uplift Premium Power Lifting Seat no funciona según se garantiza, comuníquese con el lugar donde se realizó la compra original para obtener asistencia. Deberá proporcionar el comprobante y la fecha de compra.

Alentamos a todos nuestros distribuidores que ofrezcan servicio bajo la garantía a los clientes que adquirieron el asiento Uplift Premium Power Lifting Seat de modo que no sufran demoras en recibir una unidad de reemplazo.

Le recomendamos encarecidamente que use el material y la caja de embalaje original para todas las devoluciones bajo la garantía. Estos artículos fueron diseñados para soportar el transporte. Si el asiento Uplift Premium Power Lifting Seat se daña debido a un embalaje inadecuado, el cliente deberá hacerse cargo del costo de reparación.

Nota: No se aceptarán devoluciones sin un Número de Autorización de Devolución (RA por su sigla en inglés). Indíquelo a su distribuidor que llame al 1-800-387-0896 para obtener su Número RA.

Garantía

Carex Health Brands garantiza el asiento Uplift Premium Power Lifting Seat contra la falla del producto durante un año a partir de la fecha de compra. Los daños causados por negligencia o mal uso no están cubiertos bajo la garantía. Asimismo, esta garantía no es transferible.

Si el asiento Uplift Premium Power Lifting Seat presenta defectos en los materiales o en la mano de obra, Carex Health Brands, a su propia discreción, reparará o reemplazará el asiento Uplift Premium Power Lifting Seat durante el año y sin costo alguno con excepción de los gastos de entrega.

Esta garantía quedará sin efecto si se modificó el producto con piezas o accesorios no autorizados.

Para asegurarse de que tenemos archivada su información para la Garantía, complete y envíe hoy la tarjeta de Registro de la Garantía.